

Artículos necesarios para la colección

RECOLECCIÓN DE ORINA

- 1 – Caja del equipo
- 1 – Formulario de Solicitud de Prueba (TRF)
- 1 – Taza para muestras de orina
- 1 – Bolsa para muestras con cierre de cremallera y almohadilla absorbente
- 1 – Bolsa de envío de FedEx


Si le falta alguno de los componentes necesarios o tiene preguntas sobre la colección, llame al Departamento de Atención al Cliente de Diagnostic Solutions Laboratory al 877-485-5336.

INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE ORINA DE LA PRIMERA MAÑANA

SIGA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE: LA RECOLECCIÓN INADECUADA PUEDE INVALIDAR LOS RESULTADOS O RESULTAR EN UNA MUESTRA RECHAZADA

Evite consumir frutas, mermeladas y jaleas durante las 48 horas anteriores a la recolección de la muestra.
Hable con su proveedor de atención médica antes de suspender los suplementos nutricionales o los medicamentos.


1 NOTA: Revise todas las instrucciones y los componentes del kit de recolección antes de comenzar la recolección de muestras. La muestra debe congelarse antes del envío.



A) Antes de acostarse, vacíe la vejiga y deséchela. **NO** recoger esta muestra de orina.

B) La muestra que recogerá es la primera orina de la mañana. Asegúrese de que hayan pasado al menos seis (6) horas desde que vació la vejiga.

5




A) Asegúrese de que la parte superior esté adecuada y completamente cerrada. Limpia cualquier gota del exterior de la taza.

La parte superior está completamente cerrada cuando DOS CLIC se escuchan al cerrar la muestra. Si no se escuchan dos clics, abra y vuelva a cerrar la muestra hasta que se escuche*

B) Coloque la muestra en una bolsa con cierre hermético y séllela con cuidado.


*La muestra debe estar completamente cerrada y sellada. Las muestras que se hayan filtrado en la bolsa de muestras serán rechazadas a su llegada al laboratorio.

2

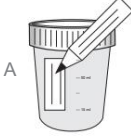

A) Escriba el nombre del paciente, la fecha de nacimiento y la fecha de recolección en la etiqueta del recipiente para muestras con un marcador permanente.


6



A) Coloque la bolsa de muestras con cierre zip con todo el contenido en el congelador.

B) Permita que la orina se congele durante un mínimo de 2 horas antes del envío.


3



A) Complete todas las secciones del Formulario de solicitud de prueba, incluida la fecha de cobro y el tipo de pago.

B) Coloque el formulario de solicitud de prueba completo en el portadocumentos de la bolsa de muestras.

7

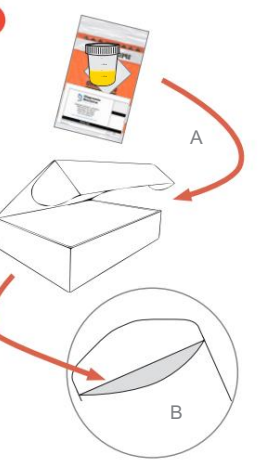


El día del envío:

A) Coloque la bolsa de muestra congelada (incluida la muestra de orina y el TRF completo) dentro de la caja del kit.

B) Coloque la caja del kit en la bolsa de envío de FedEx suministrada y envíela al Laboratorio de Soluciones de Diagnóstico para realizar pruebas. Tome nota de su número de seguimiento.*

* Si no puede enviar la muestra el día de la recolección, mantenga la muestra de orina recolectada en el congelador hasta que pueda enviarla.

4

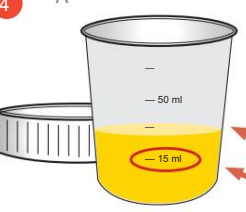

A) Al despertarse por la mañana, retire la parte superior del recipiente para muestras y déjela a un lado de manera segura para volver a usarla, luego orine directamente en el recipiente.

NO llene la taza más de 50 mL.

ASEGÚRESE de que haya al menos 15 ml de orina.

INSTRUCCIONES DE ENVÍO: Llame a FedEx al 1-800-463-3339 para programar su recogida gratuita

1. Cuando comience el saludo automático, diga: "Programar una recogida".
2. Cuando se le pregunte si su etiqueta tiene la palabra "Sello", diga "Sí".
3. Su número de seguimiento se puede encontrar en la etiqueta de devolución.